


# Ersatzteilliste / Spare parts list

## tGo Gehtrainer Gr. 1 / gait trainer size 1

Art. 9800018870000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

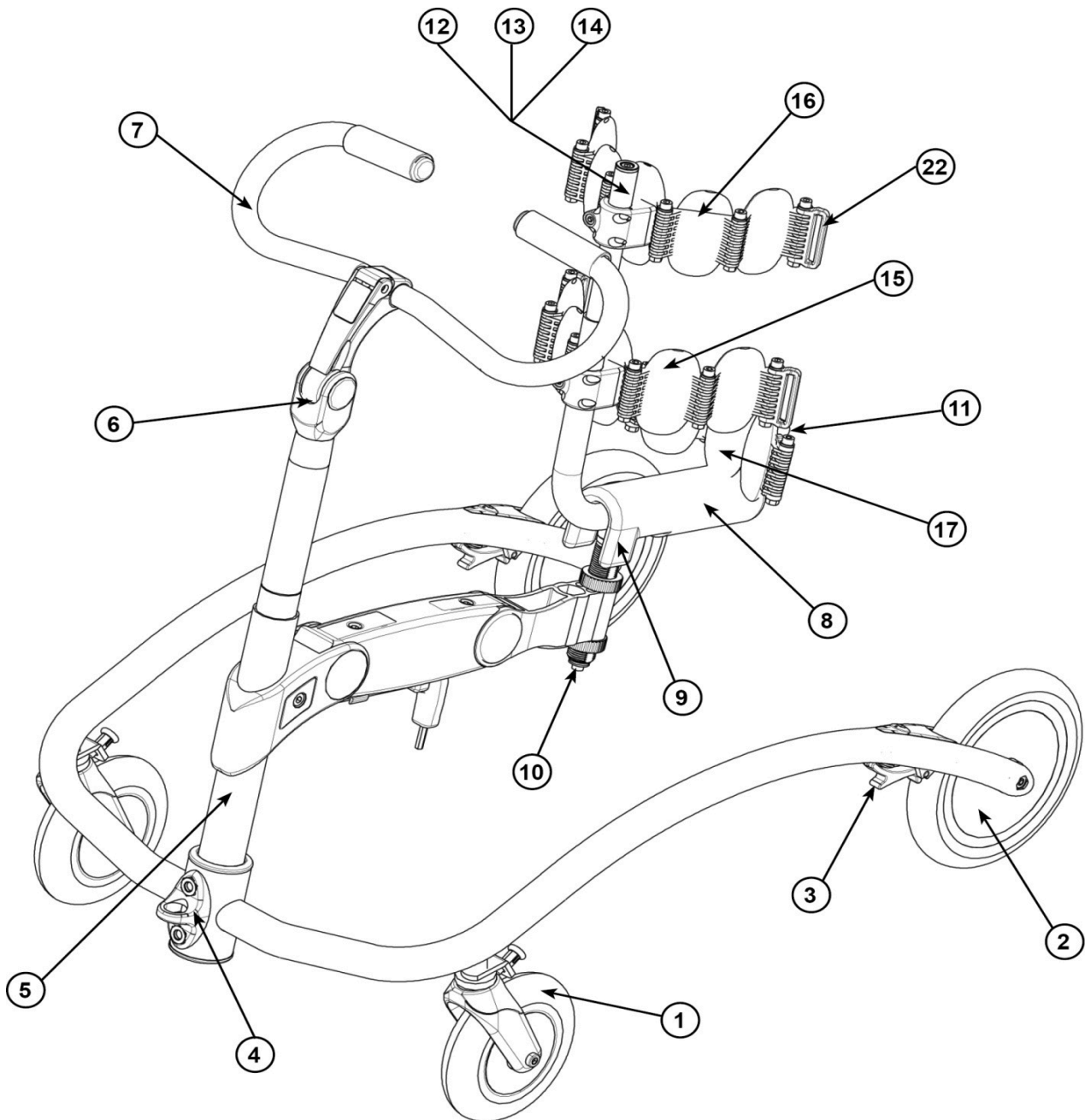

# Ersatzteilliste / Spare parts list

## tGo Gehtrainer Gr. 1 / gait trainer size 1

Art. 9800018870000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



# Ersatzteilliste / Spare parts list

## tGo Gehtrainer Gr. 1 / gait trainer size 1

Art. **9800018870000** tGo Gehtrainer Gr. 1 / tGo gait trainer size 1

Stand / status: 2019-01-18, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT


Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
1	9700285000000	Vorderrad mit Lenkstopp	castoring front wheel with steering lock	2	162,00 €
2	9700285010000	Hinterrad	rear wheel	2	76,70 €
3	9700285020000	Schleif- und Parkbremse	parking brake and friction brake	2	231,00 €
4	9700285030000	Inbusschrauben inkl. Kunststoffauge mit Muttern	plastic eye incl. allen screws, nuts	1	94,90 €
5	9700285040000	Zentralrohr Gr. 1	central tube size 1	1	205,00 €
-	9700285260000	Aufnahme Zentralrohr	admission central tube	1	-
6	9700285050000	Lenkerstange Gr. 1 inkl. Höhenverstellung	handlebar tube size 1 incl. height adjustment	1	526,00 €
7	9700285060000	Lenker Gr. 1 inkl. Griffgummis	handlebar size 1 incl. padding	1	190,00 €
8	9700285070000	Sattelbezug Gr. 1	saddle padding size 1	1	159,00 €
9	9700285081000	Sattelgestänge Gr. 1 (tGo)	saddle frame size 1 (tGo)	1	-
10	9700285090000	Gewindestange, schwarz inkl. Satz Muttern	threaded rod, black incl. nuts	1	157,00 €
11	9700285100000	Rumpfstütze (ohne Pelotten)	torso rest (without pads)	1	126,00 €
12	9800018980000	Brustpelottenrohr Länge 20 cm	chest pad tube, 20 cm	1	95,70 €
13	9800018990000	Brustpelottenrohr Länge 30 cm	chest pad tube, 30 cm	1	107,00 €
14	9800019000000	Brustpelottenrohr Länge 40 cm	chest pad tube, 40 cm	1	118,00 €
15	9700285110000	Beckenpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme	pelvis pads (5 elements) incl. tube locator	1	391,00 €
16	9700285120000	Brustpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme und Gurt	chest pads (5 elements) incl. tube locator	1	435,00 €
17	9700285130000	Rumpfpelotten (3 Stück) inkl. Aufnahme	torso pads (3 elements) incl. tube locator	1	314,00 €
18	9800018940000	Pelotte (90 x 50 mm)	additional pad	1	32,30 €
19	9700285140000	Pelotte (110 x 50 mm)	additional pad (110 x 50 mm)	1	51,20 €
20	9700285150000	Aufnahme für Pelotten 20,5 mm	tube locator for pads 20,5 mm	1	91,30 €
21	9700285160000	Aufnahme für Pelotten 25,5 mm	tube locator for pads 25,5 mm	2	91,30 €
22	9700285170000	Gurtführung für Pelottenring	belt lead for pad elements	6	18,30 €
23	9700285180000	Gurtband 100 cm inkl. Klettverschluss und Gurtschnalle	100 cm belt incl. velcro and sliding buckle	1	43,80 €
24	9700285190000	Inbusschlüssel und Ringschlüssel	allen key and ring wrench	1	40,10 €

# Ersatzteilliste / Spare parts list

## tGo Gehtrainer Gr. 2 / gait trainer size 2

Art. 9800018880000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

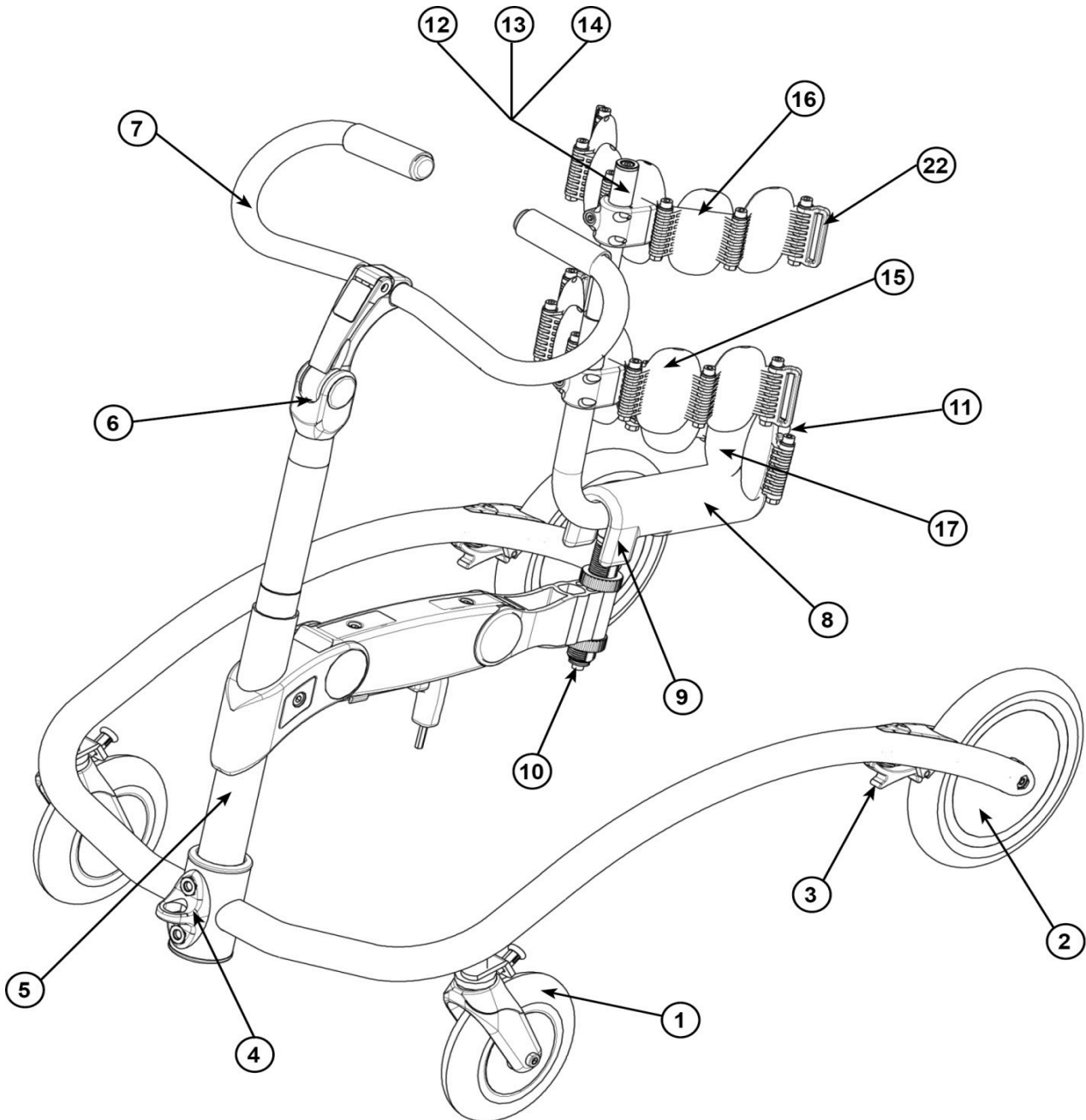

# Ersatzteilliste / Spare parts list

## tGo Gehtrainer Gr. 2 / gait trainer size 2

Art. 9800018880000

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



## Ersatzteilliste / Spare parts list

### tGo Gehtrainer Gr. 2 / gait trainer size 2

Art. 9800018870000

Stand / status: 2019-01-18, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
1	9700285000000	Vorderrad mit Lenkstopp	castoring front wheel with steering lock	2	162,00 €
2	9700285010000	Hinterrad	rear wheel	2	76,70 €
3	9700285020000	Schleif- und Parkbremse	parking brake and friction brake	2	231,00 €
4	9700285030000	Inbusschrauben inkl. Kunststoffauge mit Mutter	plastic eye incl. allen screws, nuts	1	94,90 €
5	9700285200000	Zentralrohr Gr. 2	central tube size 2	1	205,00 €
-	9700285260000	Aufnahme Zentralrohr	admission central tube	1	-
6	9700285210000	Lenkerstange Gr. 2 inkl. Höhenverstellung	handlebar tube size 2 incl. height adjustment	1	526,00 €
7	9700285220000	Lenker Gr. 2 inkl. Griffgummis	handlebar size 2 incl. padding	1	190,00 €
8	9700285230000	Sattelbezug Gr. 2	saddle padding size 2	1	159,00 €
9	9700285241000	Sattelgestänge Gr. 2 (tGo)	saddle frame size 2 (tGo)	1	-
10	9700285090000	Gewindestange, schwarz inkl. Satz Muttern	threaded rod, black incl. nuts	1	157,00 €
11	9700285100000	Rumpfstütze (ohne Pelotten)	torso rest (without pads)	1	126,00 €
12	9800018980000	Brustpelottenrohr Länge 20 cm	chest pad tube, 20 cm	1	95,70 €
13	9800018990000	Brustpelottenrohr Länge 30 cm	chest pad tube, 30 cm	1	107,00 €
14	9800019000000	Brustpelottenrohr Länge 40 cm	chest pad tube, 40 cm	1	118,00 €
15	9700285110000	Beckenpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme	pelvis pads (5 elements) incl. tube locator	1	391,00 €
16	9700285120000	Brustpelotten (5 Stück) inkl. Aufnahme und Gurt	chest pads (5 elements) incl. tube locator	1	435,00 €
17	9700285130000	Rumpfpelotten (3 Stück) inkl. Aufnahme	torso pads (3 elements) incl. tube locator	1	314,00 €
18	9800018940000	Pelotte (90 x 50 mm)	additional pad	1	32,30 €
19	9700285140000	Pelotte (110 x 50 mm)	additional pad (110 x 50 mm)	1	51,20 €
20	9700285150000	Aufnahme für Pelotten 20,5 mm	tube locator for pads 20,5 mm	1	91,30 €
21	9700285160000	Aufnahme für Pelotten 25,5 mm	tube locator for pads 25,5 mm	2	91,30 €
22	9700285170000	Gurtführung für Pelottenring	belt lead for pad elements	6	18,30 €
23	9700285180000	Gurtband 100 cm inkl. Klettverschluss und Gurtschnalle	100 cm belt incl. velcro and sliding buckle	1	43,80 €
24	9700285190000	Inbusschlüssel und Ringschlüssel	allen key and ring wrench	1	40,10 €