

ThevoFloor – Das Boden-Pflege-System

DE	Bedienerhandbuch – ThevoFloor	3
-----------	--	----------



Sehr geehrte Nutzer,

Sie haben mit dem ThevoFloor Boden-Pflege-System ein Produkt erworben, das höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. Für ThevoFloor werden modernste Werkstoffe verwendet, die eine lange Lebensdauer garantieren.

Bevor Sie ThevoFloor in Gebrauch nehmen, lesen Sie dieses Bedienerhandbuch unbedingt sorgfältig durch.

Es gibt Ihnen viele hilfreiche Informationen und Hinweise.

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen zu ThevoFloor, rufen Sie uns gerne an.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.thevo.info

Unsere Adresse: Thomas Hilfen für Körperbehinderte
GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1
D - 27432 Bremervörde
Tel.: 0049 (0)47 61 / 88 60
www.thevo.info

Inhalt

Seite

Technische Daten	3
Lieferumfang.....	3
Anwendung	5
Desinfektionsmethoden und Reinigungsempfehlungen	5
Anwendungsrisiken und Kontraindikationen.	5
Garantiebedingungen.....	5



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Technische Daten

	Kopfteil	Seitenteil
Breite Wandelemente	8 cm	8 cm
Länge Wandelemente	140 m	208 cm
Höhe Wandelemente	80 cm	80 cm

Lieferumfang

- ThevoFloor Wandelemente mit Inkontinenzbezug
- Verbindungsgurt
- Abdeckstreifen für Klettband
- Bedienerhandbuch

Anwendung

Das ThevoFloor Boden Pflege System ist in Verbindung mit unserer ThevoautoActiv in Zimmerecken einsetzbar.

Stellen Sie die beiden Wandelemente an die Wände der betreffenden Zimmerecke. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass der Klettstreifen an der Stirnseite kurzen Kopfteil-Wandelementes zu den Klettstreifen an der Vorderseite des längeren Seitenteil-Wandelementes zeigen (Abb. 1). Verbinden Sie die Wandelemente sicher mit den Klettstreifen. Der Abdeckstreifen kann auf das nicht verwendete Klettband geklebt werden.

Ziehen Sie den mitgelieferten Verbindungsgurt durch die Laschen im Bezug der Wandelemente (Abb. 2).

Legen Sie die ThevoautoActiv mit der roten Seite nach oben in die Zimmerecke. Das Kopfende der ThevoautoActiv soll hierbei zu dem kurzen Wandelement zeigen. Schließen Sie den Verbindungsgurt um die ThevoautoActiv. Passen Sie die Länge des Gurtes so an, dass die Wandelemente sicher mit der ThevoautoActiv verbunden sind (Abb. 3).

Desinfektionsmethoden und Reinigungsempfehlungen

Wandelemente

Die Bezüge sind durch einen eingenähten Reißverschluss leicht abzunehmen und können gewaschen werden.

Inkontinenzbezug (gummierter Bezug)

- waschbar bei 65 °C
- trocknerfest
- per Wischdesinfektion zu reinigen

Desinfektion

Das ThevoFloor kann mit handelsüblichen Wischdesinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen (Gegenanzeigen)

Die Anwendung von ThevoFloor bedarf keiner speziellen Einweisung. Aus dem bisherigen praktischen Einsatz des Produktes und aus umfangreichen Tests sind uns keinerlei Probleme im Umgang mit dem Produkt bekannt geworden. Bei sachgerechtem Gebrauch können Risiken bei der Anwendung ausgeschlossen werden.

Wichtiger Hinweis: Es muss bei der Versorgung darauf geachtet werden, dass die Matratze nach dem entsprechenden Körpergewicht des Nutzers ausgewählt wird. Bitte beachten Sie hierfür die Angaben in der Bedienungsanleitung der ThevoautoActiv.

Garantiebedingungen

Die Firma Thomashilfen verbürgt sich für die Qualität des gelieferten Produkts. Bei

der Wahl des Materials sowie der Verarbeitung wurden höchste Produktionsstandards zugrunde gelegt. Alle ThevoFloor wurden einer gründlichen Endkontrolle unterzogen.

Thomashilfen bietet Ihnen eine Garantie von 24 Monaten. Bitte bewahren Sie deshalb alle im Zusammenhang mit ThevoFloor ausgehändigten Belege sorgfältig auf. Die Garantie umfasst alle Ansprüche die aufgrund von Arbeits- und Materialfehlern entstehen, welche die Funktion beeinträchtigen.

Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung sowie natürlichen Verschleiß entstehen.



Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde
Telefon: +49 (0) 47 61 / 8860 · Fax: +49 (0) 47 61 / 886-19
E-mail: info@thomashilfen.de · www.thevo.info