

## **DE** Hinweis Montage Zubehör – Hercules Small

### **Seatfix-Adapter, hinter dem Sitz (Art.-Nr. 9800004790000)**

Bei der Nutzung des Seatfix-Adapters (Art.-Nr. 9800004790000) mit dem Hercules Small kann es zu einer Einschränkung mit der Drehfunktion kommen.

Das Bild zeigt die kleinste Einstellung des Seatfix-Adapters. Bitte achten Sie darauf, dass die Markierung **stets sichtbar bleibt** um Einschränkungen in der Drehfunktion zu vermeiden.

## **EN** Note on mounting accessories – Hercules Small

### **Seatfix adapter, behind the seat (item no. 9800004790000)**

When using the Seatfix Adapter (Item No. 9800004790000) with the Hercules Small, there may be a limitation with the swivel function.

The picture shows the smallest setting of the Seatfix adapter. Please make sure that the **marking always remains visible** to avoid restrictions in the turning function.



  
**Thomashilfen**

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG  
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany  
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19  
E-Mail: [info@thomashilfen.de](mailto:info@thomashilfen.de) · [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

