
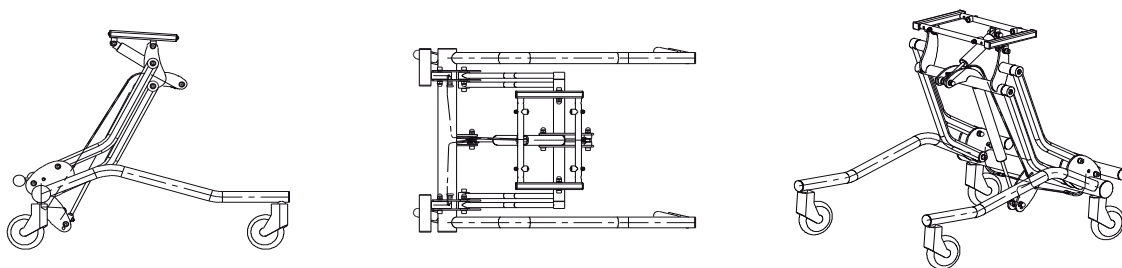


# Ersatzteilliste / Spare parts list

## Q-Chassis

Art. 980006666000

Stand / status: 2023-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

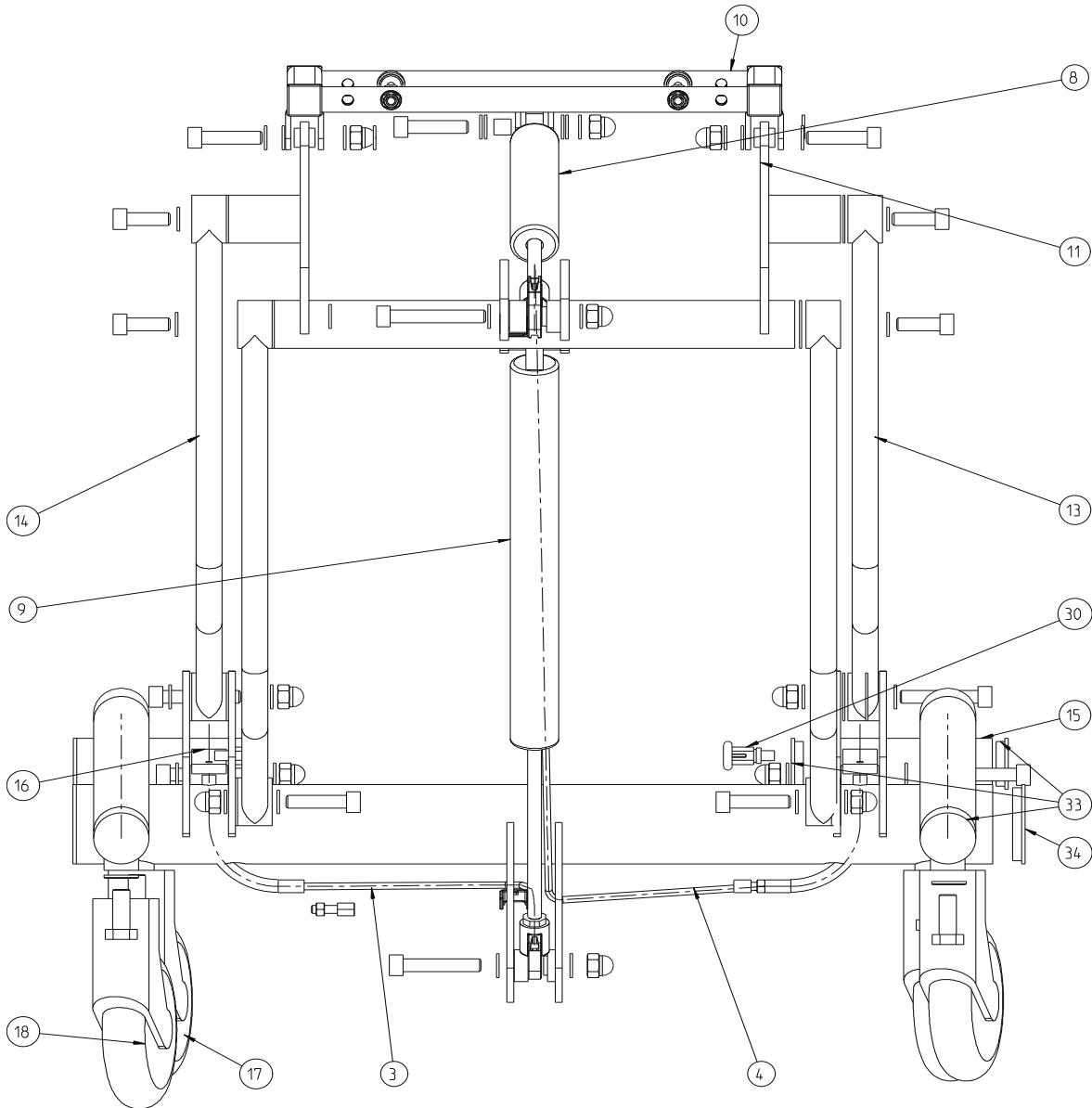

# Ersatzteilliste / Spare parts list

## Q-Chassis

Art. 980006666000

Stand / status: 2023-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

\* auf Anfrage / on request

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
3 & 4	9640434200000	Satz Bowdenzüge Q-UG 08	Bowden cable set	1	71,70 €
8	6292402020000	Gasdruckfeder 400 N	Gas spring 400 N	1	92,20 €
9	6292402030000	Gasdruckfeder 1000 N	Gas spring 1000 N	1	104,00 €
10	6800001100000	Schwenkrahmen	Pivoting frame	1	102,00 €
11	6800001127022	Oberrahmen	Top frame	1	325,00 €
12	6800001137022	Unterrahmen	Underframe	1	*
13	6800008907022	Hebearm Links	Lifting arm left	2	*
14	6800008917022	Hebearm Rechts	Lifting arm right	2	*
15	6800008957022	Pedal Links	Pedal left	1	59,80 €
16	6800008967022	Pedal Rechts	Pedal right	1	59,80 €
17	6032124019005	Lenkrolle Ø 100 ohne Feststeller	Steering roller Ø 100 w/o locking device	2	41,50 €
18	6032124029005	Lenkrolle Ø 100 mit Feststeller	Steering roller Ø 100 with locking device	2	36,20 €
30	9700635100001	Zugschnäpper mit Arretierung	Locking pin	2	13,80 €
33	7502018039905	Lamellenstopfen 32x5	Blade plug 32x5	6	0,80 €
34	7502018049905	Lamellenstopfen 50x5	Blade plug 50x5	2	0,70 €