

Ersatzteilliste / Spare parts list

Reha-Buggy Grizzly

Art. 9800078700000, 9800078710000, 9800078720000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



1.1




1.2



1.3



1.4

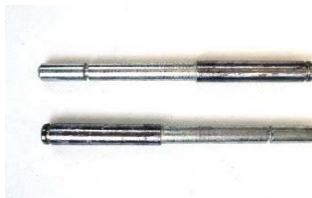

1.5



1.6



1.7



1.8



1.9



1.10



1.11



2.1

Ersatzteilliste / Spare parts list



2.2



3.1



3.2



3.3



3.4



3.5




3.6



3.6



4.1

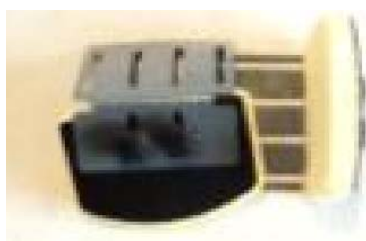

4.2




4.5



4.6

Ersatzteilliste / Spare parts list

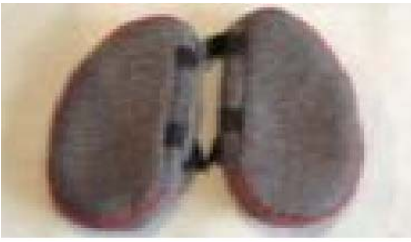

4.7



4.8



4.9



4.10



4.11



4.12



4.13



4.14



4.15



4.16



4.17



4.18

Ersatzteilliste / Spare parts list



4.19



4.20



4.21



4.22

Ersatzteilliste / Spare parts list

Reha-Buggy Grizzly

Art. 9800078700000, 9800078710000, 9800078720000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

* auf Anfrage / on request

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
1.1	9700511800000	Untergestell ohne Polster	Underframe without upholstery	1	1.498,00 €
1.2	-	Schiebegriff	Push handle	1	*
1.3	9700511811000	Vorderradaufnahme, rechts	Front wheel mount, right	1	32,30 €
1.3	9700511810000	Vorderradaufnahme, links	Front wheel mount, left	1	32,30 €
1.4	-	Ankipphilfe	Tipping aid	1	*
1.5	-	Achse vom Rad	Axle from wheel	1	*
1.6	9700511320000	Quertraverse hinten mit Zentralbremse	Rear cross member with central brake	1	228,00 €
1.7	-	Transportsicherung	transport lock	1	*
1.8	9700511580000	Hinterrad	Rear wheel	2	62,30 €
	9700511570000	BG Vorderrad inkl. Achse und Gabel	Front wheel incl. axle and fork	1	196,00 €
1.9	-	Vorderrad	Front wheel	1	*
1.10	-	Vorderradgabel	Front fork	1	*
1.11	-	5 Punkt Gurt	5 Point belt	1	*
2.1	9700512090000	Sitz- und Rückenlehne	Seat and backrest	1	1.060,00 €
2.2	9700511970000	Fußstütze	Footrest	1	61,60 €
3.1	9700511260000	Wetterdach grau **	Weather roof grey	1	122,00 €
3.2	-	Rahmen für Wetterdach	Frame for weather roof	1	*
3.3	9700512270000	Sitzpolster **	Seat cushion	1	645,00 €
3.4	9700511920000	Rückenpolster **	Back cushion	1	266,00 €
3.5	9700511420000	Sitzhose **	Sitting trousers	1	32,50 €
3.6	9700511430000	Schlupfsack **	Slip sack	1	93,20 €
3.7	9700512190000	Wadenpolster	Calf pads	1	51,30 €
4.1	9700511390000	Thoraxpelotte, Polster **	Thorax pelotte pad, cushion	2	20,50 €
4.2	9700511380000	Thoraxpelotten Metallgestell	Thorax pelotte metal frame	2	40,70 €
4.5	9700511370000	Pelottenpolster, länglich grau **	Pelotte pad, elongated grey	2	28,40 €
4.6	9700511360000	Pelotten länglich, Metallgestell	Elongated pads, metal frame	2	48,70 €

Ersatzteilliste / Spare parts list

4.7	-	Sitzseitenpelotten Polster **	Seat side pads	2	*
4.8	-	Sitzseitenpelotten Metallgestell	Seat side supports Metal frame	2	*
4.9	9700511340000	Abduktionsblock, roh	Abduction block, rough	1	14,40 €
4.10	9700511350000	Abduktionsblock Polster **	Abduction block pad	1	8,30 €
4.11	-	Gurtpolster **	Seatbelt pad	2	*
4.12	9700511290000	5-Punkt-Sicherheitsgurt	5-point safety belt	1	48,70 €
4.13	9700511840000	Transporttasche **	Carrying bag	1	141,00 €
4.14	9700511850000	Einkaufstasche **	Shopping bag	1	153,00 €
4.15	9700512560000	Winterhandschuhe **	Winter gloves	2	55,80 €
4.16	9700511860000	Zusatz-Set- Grizzlybär	Additional Set- Grizzly Bear	1	94,70 €
4.17	9700511210000	Sonnenschirm, blau	Umbrella, blue	1	68,80 €
4.18	9700511440000	Regenschutz	Rain cover	1	64,90 €
4.19	-	Moskitoschutz	Mosquito net	1	*
4.20	9700512300000	Handbogen	Handbow	1	51,60 €
4.21	-	Therapietisch mit Verriegelung	Therapy table with lock	1	*
4.22	-	Therapietisch ohne Verriegelung	Therapy table without lock	1	*

- Artikelnummern auf Anfrage / Item code on request

** Erhältlich in den Farben: Grau, Rot/Grau oder Blau/Grau - bitte mit angeben.

Bei Nachbestellung von Polsterteilen ist die Garantie auf eine identische Farbe und Haptik des Polsters mit dem Polster des Ursprungsproduktes nicht mehr gegeben. Aufgrund von Chargenfertigung sind minimale Abweichungen möglich.