


Ersatzteilliste / Spare parts list

Swifty

Art. 9800068065000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations











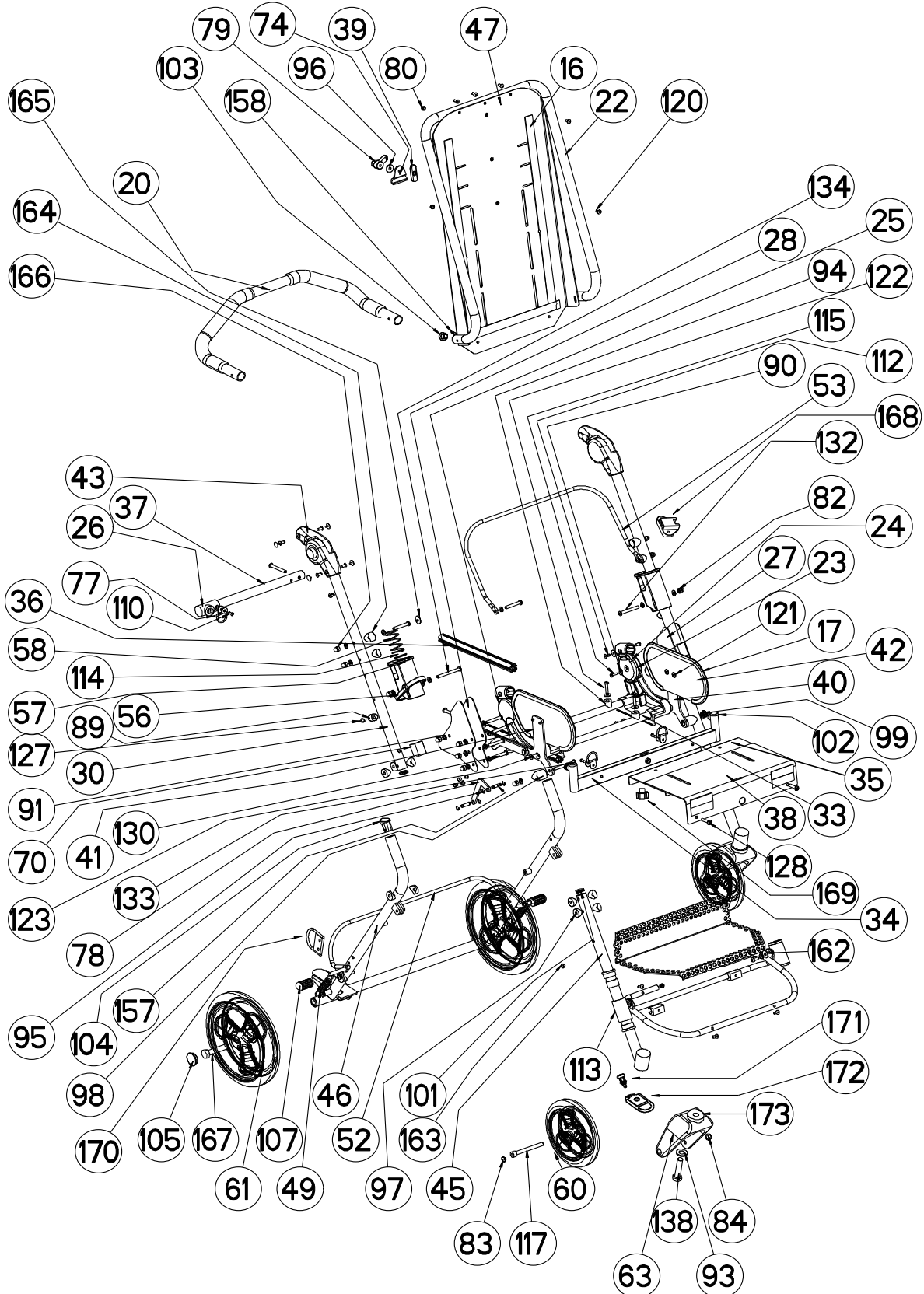


Ersatzteilliste / Spare parts list

Swifty

Art. 9800068065000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

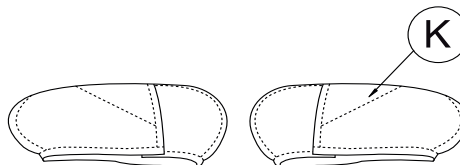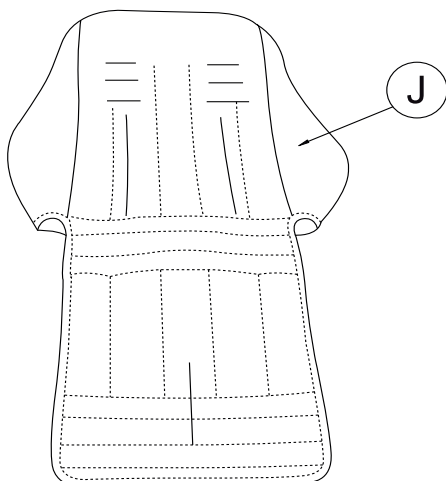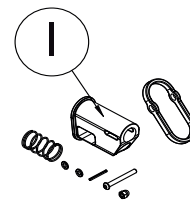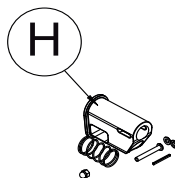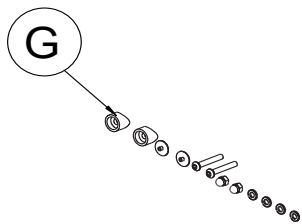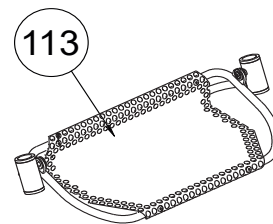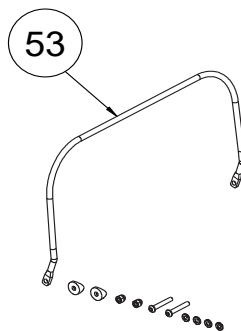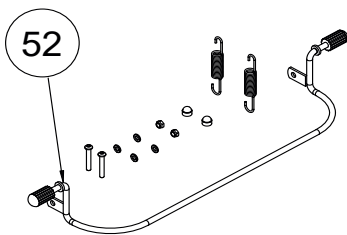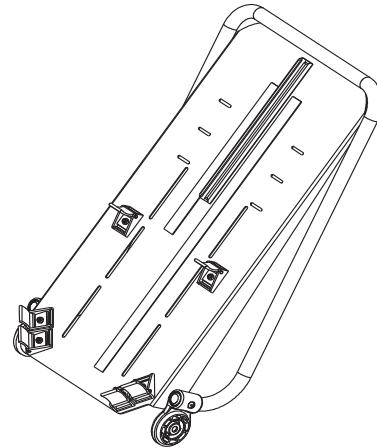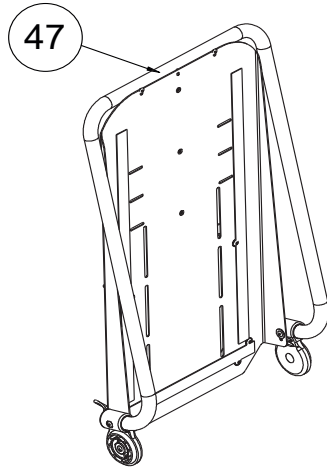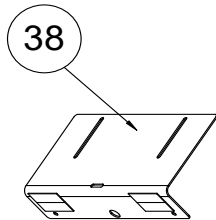

Ersatzteilliste / Spare parts list

Swiftly

Art. 9800068065000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

* auf Anfrage / on request

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
16	5900025100000	Klettband Pilzkopf selbstkl. 20mm	Velcro, stiff	2,6	*
17	7502023009905	Kantenschutzprofil	Edge protection profile	2	7,30 €
20	9007003280000	Baugruppe Schiebebogen	Push bar Swiftly with grip rubber	1	88,90 €
23	7502000009905	Gelenk Rückenwinkel	Joint back angle	2	3,67 €
24	7502002019905	Seitenteil links	Side support left with drilling	1	6,80 €
25	7502003019905	Seitenteil rechts	Side support right with drilling	1	6,80 €
27	9007003080000	Baugruppe Swiftly Gestellabdeckung	Frame cover	1	53,00 €
30	9007003250000	Handrohr	Hand tube	2	88,70 €
33	9007003220000	Sitzaufnahme	Seat adapter Swiftly	2	59,60 €
34	9007003247022	Quertraverse	Horizontal cross arm	1	45,30 €
35	6800002030000	Sitzplatte fest	fix seatplate	1	*
36	6800004020000	Führungsprofil Sitz	Guidance profile	2	13,50 €
37	6800008060000	Griffbogen Swiftly komplett	Hand bar	1	20,60 €
38	6800022030000	Baugruppe verstellbare Sitzplatte	Construction kit adjustable Seat plate	1	14,50 €
39	9700680140000	Schieber f. Rückenplatte	Slider backrest	1	15,40 €
40	9007003447022	Schere links	Scissors, left	1	26,90 €
41	9007003457022	Schere rechts	Scissors, right	1	26,90 €
42	6800048090000	Seitenführung	Side support	2	18,70 €
43	9700680350000	Baugruppe Gelenk Schiebegriff	Construction kit joint pushbar	1	15,60 €
45	6800006027022	Swiftly Vorderrohr	Swiftly front tube	2	97,90 €
46	9007003307022	Swiftly Hinterrahmen	Swiftly rear frame	1	170,00 €
47	9007003310000	Baugruppe Rücken	Construction kit back	1	*
49	9700664590000	Bremsfeder, schwarz verzinkt (Swiftly)	Brake spring, black (Swiftly)	2	6,00 €
52	9007003200000	Swiftly Bremse	Brake Swiftly	1	41,20 €

Ersatzteilliste / Spare parts list

53	9007003569005	Bügel - Rückenverstellung	Backrest adjustment bow	1	39,30 €
56	9700664290000	Bügel für Entriegelung	Bracket for unlocking	1	2,40 €
60	9700668299005	EVA-Rad R 180 vorne, schwarz	Front wheel EVA R 180, black	2	26,50 €
61	9700668289005	EVA-Rad R 250 hinten, schwarz	Rear wheel EVA R 250, black	2	42,10 €
63	9700668250000	Swiftly Vorderradgabel Kunststoff	Plastic fork for front wheel	2	34,30 €
70	9700680450000	Klemmschalengleiter	Locking shell glider	2	1,20 €
74	6800008820000	Swiftly Klemme Rückenbügel	Locker, backrest bow	1	3,50 €
77	6800027000000	Halbrundring gebohrt mit Schlaufe	Half round ring drilled with loop	4	2,20 €
78	6800008800000	Swiftly Hebel Gestell	Lever frame Swiftly	2	5,10 €
79	7502013999005	Klemmhebel fest mit Innengewinde M6	Release lever with inside thread M6	1	6,80 €
80	6900000541000	Mutter ISO 10511 M5	Nut ISO 10511 M5	2	0,13 €
82	6900040649005	Hutmutter Sonderform-hoch M6 schwarz	Cap nut M6, black	14	0,91 €
83	6730121089905	Innensechskant Schutzkappe M8	Hexagon socket protection cap M8	2	0,80 €
84	6900000841000	Mutter ISO 10511 M8	Nut ISO 10511 M8	2	0,60 €
89	6970820169007	Distanzstück Swiftly Kst Ø 16 mm	Plug hand tube	2	1,70 €
90	6970000050001	Scheibe ISO 7093 5,3-15x1,2	Washer ISO 7093 5,3-15x1,2	8	0,13 €
91	6970000060000	Scheibe ISO 7090 B 6,4-12x1,6	Washer ISO 7090 B M6	28	0,13 €
93	6970000120000	Scheibe ISO 7090 A 13-24x2,5	Washer ISO 7090 A 13-24x2,5	2	1,30 €
94	6970000650000	Profilscheibe 5,3-15x10	Profil washer 5.3-15x10	4	0,39 €
95	6970100050000	Sicherungsscheibe DIN 6799 D6-8 Ø 5	Locking washer DIN 6799 Ø 5	8	0,13 €
96	6970000670000	Scheibe ISO 7093 PA 6,4-18x1,6	Washer ISO 7093 PA 6,4-18x1,6	3	0,26 €
97	6970000750000	Profilscheibe Kst 6,3-20x3	Washer with fillet 20x3	20	0,26 €
98	6970820207022	Distanzstück 1 Profil Alu 20 mm	Spacer 1 profile	2	1,70 €
99	7502016009905	Stopfen Gewindebohrung	Plug tap hole	2	0,39 €
100	7502016109905	Zierstopfen für Blindbohrung	Plug tab for hole	8	0,26 €
101	7502016129905	Stopfen Rohr flach	Plug for tube, plane	4	0,26 €
102	7502017009905	Stopfen Quertraverse	Plug cross arm	2	0,13 €
103	7502018009905	Lamellenstopfen 20x0,8-2,5	Blade plug 20x0,8-2,5	2	0,53 €
104	7502019029905	Kunststoffstopfen schräg	Plastic plug	2	0,90 €
105	9700676480000	Nabenabdeckkappe, schwarz	Wheel cap black	2	1,50 €
107	9700667260000	Bremsgummi	Brake rubber	2	9,50 €
110	6970401050000	Blindniet DIN 7337 A 4x12	Blind rivet 4x12	4	
112	6970501450000	Blindniete DIN 7337 A 5,0x14	Blind rivet DIN 7337 A 5,0x14	11	0,26 €
113	9007003187022	Baugruppe Fußstütze Effekt 7	Footrest Swiftly Effect 7	1	101,00 €
115	6910401420000	EJOT -Schraube WN 1411 KB 4,0x14	EJOT screw WN 1411 KB 4,0x14	2	0,60 €
116	6930601000000	Gewindestift DIN 4026 M6x10	Grub screw DIN 4026 M6x10	2	0,60 €
117	6930807550000	Schraube ISO 4762 M8x75	Screw ISO 4762 M8x75	2	1,00 €

Ersatzteilliste / Spare parts list

120	6930501030000	Senkschraube ISO 10642 M5x10	Countersunk-head screw ISO 10642 M5x10	2	*
121	6930500820000	Linsenschraube ISO 7380-MS M 5x8	Fillister head screw M5x8	4	0,30 €
122	6930502522000	Linsenschraube ISO 7380 M5x25	Fillister head screw M5x25	4	0,80 €
123	6930601620000	Senkschraube ISO 10642 M6x16	Countersunk-head screw M6x16	4	0,60 €
127	6930602022000	Linsenschraube ISO 7380 M6x20	Fillister head screw ISO 7380 M6x20	4	0,80 €
128	6930602522000	Linsenschraube ISO 7380 M6x25	Fillister head screw ISO7380 M6x25	2	*
130	6930604022000	Linsenschraube ISO 7380 M6x40	Fillister head screw ISO 7380 M6x40	14	0,90 €
132	6930605022000	Linsenschraube ISO 7380 M6x50	Fillister head screw ISO 7380 M6x50	2	1,10 €
133	6930605522000	Linsenschraube ISO 7380 M6x55	Fillister head screw ISO7380 M6x55	3	1,00 €
138	6931205540000	Schraube ISO 4014 M12x55	Screw ISO 4014 M12x55	4	1,00 €
157	6070270000000	Gelenkbolzen 6x15,5	Joint pin 6x15,5	4	3,30 €
158	5900082020000	Schließer für Gurtbefestigung	Closer for belt, drilled	6	3,30 €
162	6970000690000	Scheibe DIN 7093 PA 6,4-12x1	Washer DIN 7093 PA 6,4-12x1	4	0,20 €
163	6970500840000	Blindniete DIN 7337 A 5x8	Blind rivet 5x8	1	0,13 €
164	6970816079005	Sattelstück KST 6,3-20x10	Washer with fillet 20x10	2	0,50 €
165	6730101109005	Kappe BI 18/4,3x3,5; SW4	Cap BI 18/4,3x3,5; SW4	2	0,50 €
166	6900010641000	Selbstsichernde Hutmutter M6 DIN 986	Self-closing head nut M6 DIN 986	2	0,30 €
167	6931206540000	Schraube ISO 4014 M12x65	Screw ISO 4014 M12x65	2	1,70 €
168	9007050229005	Beschläge Wetterdach Swifty Paar	Fittings for sun and rain cover (pair) Swifty	1	35,90 €
169	6930528260000	Sterngriff Soft Touch M5 D=28mm H=25mm	star knob soft touch M5	2	5,72 €
170	9700664421000	Swifty Crash-Öse hinten Gr. 1	Swifty rear crash eyelet	2	13,30 €
171	9700664473001	Zugschnäpper f. Radfeststeller, roter Kunststoffkopf	Locking pin for wheel lock, red plastic head	2	10,70 €
172	9700664281000	Swifty Crashöse vorne inkl. Radfeststeller	Swifty front crash eye incl. wheel locks	2	19,40 €
173	6970820120000	AL-Distanzstück Swifty Vorderrad-Befestigung	Spacer Swifty Rolko front wheel	2	5,60 €
G	9007003579005	Swifty Rückenwinkel Begrenzer	Swifty hip angle limiter	2	6,10 €
H	9700680720000	Entriegelung ohne Bügel	Unlocking device complete	1	12,30 €
I	9700680750000	Entriegelung mit Bügel	Unlocking device with bracket	1	17,20 €
J	5005100119905	Rückenpolster Swifty	Backrest upholstery	1	180,00 €
K	5005124119905	Sitzseitenpolster Swifty	Lateral seat upholstery	1	41,80 €