




VELA Hip Hop 100

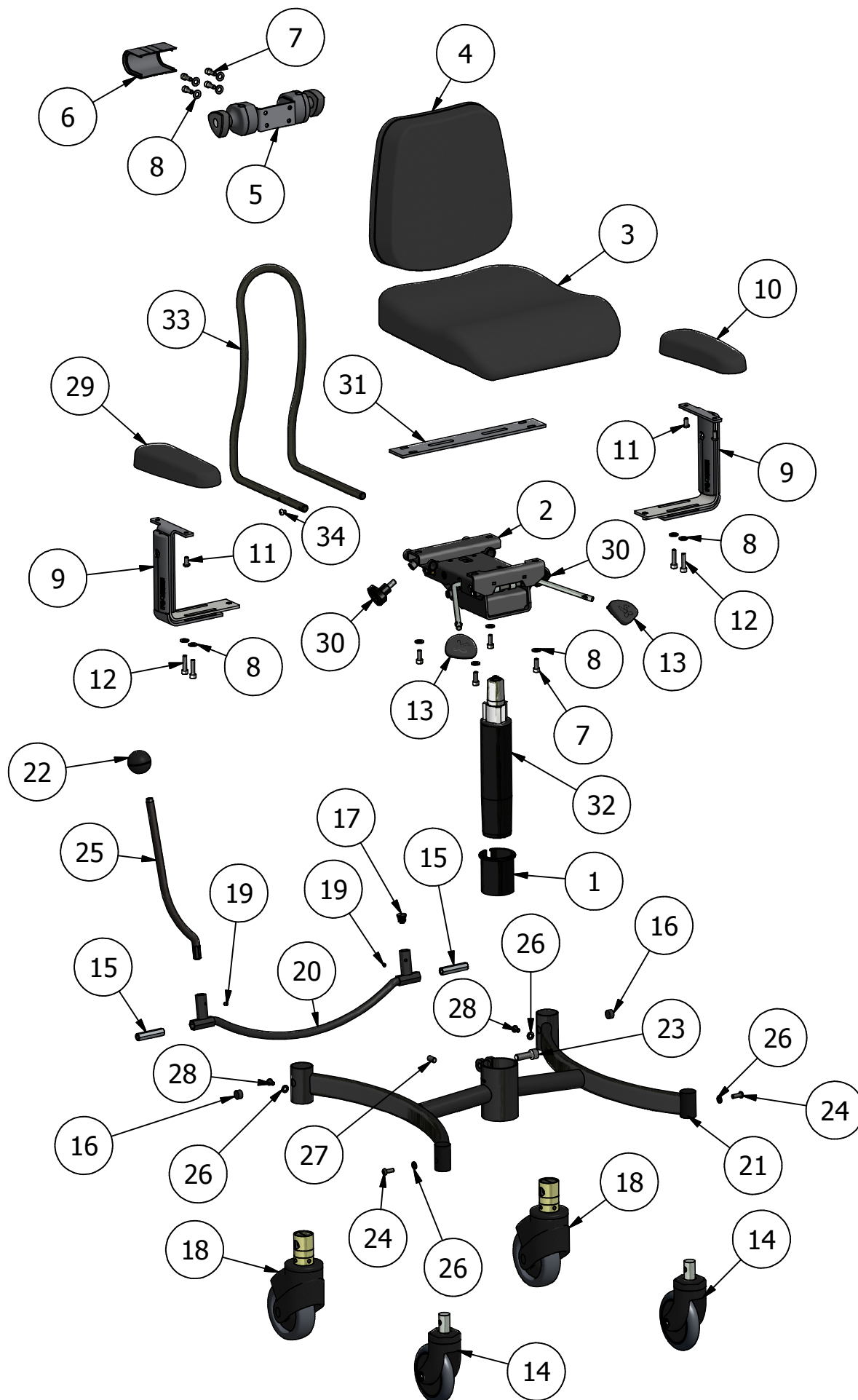

RESERVEDELE					
Pos	Pcs	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Stock no
1	1	Foring for Ø50 konus/yderrør koksgrå	Conical Busching Ø50 grey	Ausfütterung Für Ø51 Konus/rohr	924928
2	1	Bæreplade 16	Seat support 16	Trägerplatte 16	05465
3	1	Sæde E2 32x35 cm	Seat E2 32x35 cm	Sitz E2 32x35 cm	06484940583
4	1	Ryg E2 samlet 26x26 cm	Back rest E2 complete 26x26 cm	Rücken E2 komplett 26x26 cm	08206822583
5	1	Ryghængsel HH samlet	Hinge f/back rest HH complete	Scharniere für Rücken, komplett	925429
6	1	Kappe for ryghængsel HH	Cover for hinge f/back rest	Mantel für Rückenscharniere HH	925512
7	8	Skrue med inv. sekskant CH	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	8001206016
8	12	Skive	Washer	Scheibe	8802207
9	2	Armlænsstang HH samlet	Arm rest bar HH complete	Armlehnenstange HH, komplett	925589
10	1	Armlæns pude HH 6x21 Vs.	Arm rest pad HH 6x21 Lh.	Armlehnenkissen HH 6x21 L.	15109003
11	4	Skrue med indv. sekskant PH	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003206012
12	4	Skrue med indv. sekskant CH	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	8001206025
13	2	Greb for højdejustering	Lever for height adjustment	Griff für Höheneinstellung	925642
14	2	Hjul sporkugleleje 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014915
15	2	Sekskant tap for bremsestang	Hexagon tap brake stick	6-kant Zapfen für Bremsstangen	923451
16	2	Rubber plug Ø14x7,5 mm	Rubber plug Ø14x7,5 mm	Gummistopfen Ø14x7,5 mm	923366
17	1	Rørben Ø15	Plug Ø15 mm	Abdeckstopfen Ø15 mm	921694
18	2	Bremsehjul Soft Lock 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014015
19	2	Stopskrue med indv. sekskant med krater	Hexagon Socket Set Screw	Gewindestift	8004105006
20	1	Bremseaksel Flex Uni-21 sort metallic kpl	Brake shaft flex Uni-21 black metallic	Bremswelle Flex Uni-21 Schwarz	925727
21	1	Fod H3 sort metallic	Frame H3 black metallic	Untergestell H3 Schwarz metallic	035379946
22	1	Håndkugle for bremsestang sort	Ball for brake stick black	Kugel für Bremsstange Schwarz	923449
23	1	Skrue med indv. sekskant CH	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	8001210030
24	2	Skrue med indv. sekskant PH	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806016
25	1	Bremsestang buet m/6-kt sort met.	Break lever curved black	Bremsstange gebogen schwarz	925725
26	4	Skive	Washer	Scheibe	8802806
27	1	Pinolskrue M8x16 m/indløb	Pivot Screw M8x16	Spitzenschraube M8x16	925613
28	2	Skrue m/indv. 6-kt RH	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806010
29	1	Armlæns pude HH 6x21 Hs	Arm rest pad HH 6x21 Rh.	Armlehnenkissen HH 6x21 R.	15209003
30	2	Håndskruer VTR.40 p-M8x16	Thumb screw VTR 40 M8x16	Handschrube VTR M8x16	925615
31	1	Armlænsbund 284 HH E2	Arm rest fixture HH E2	Armlehnenbefästigung HH E2	925493
32	1	Column FixLift 100 250N	Gas column FixLift 95 250N	Gasfedersäulen FixLift 95 250N	093025101
33	1	Rygbøjle 6.1 - 360	Back rest arm 6.1 - 360	Rückenbügel 6.1 - 360	925720
34	1	Skrue m/torx PH Taptite M5 x 6 mm	Screw w/torx PH Taptite M5 x 6 mm	Schrauben m/torx Taptite M5 x 6 mm	8017205006