




VELA Salsa 100

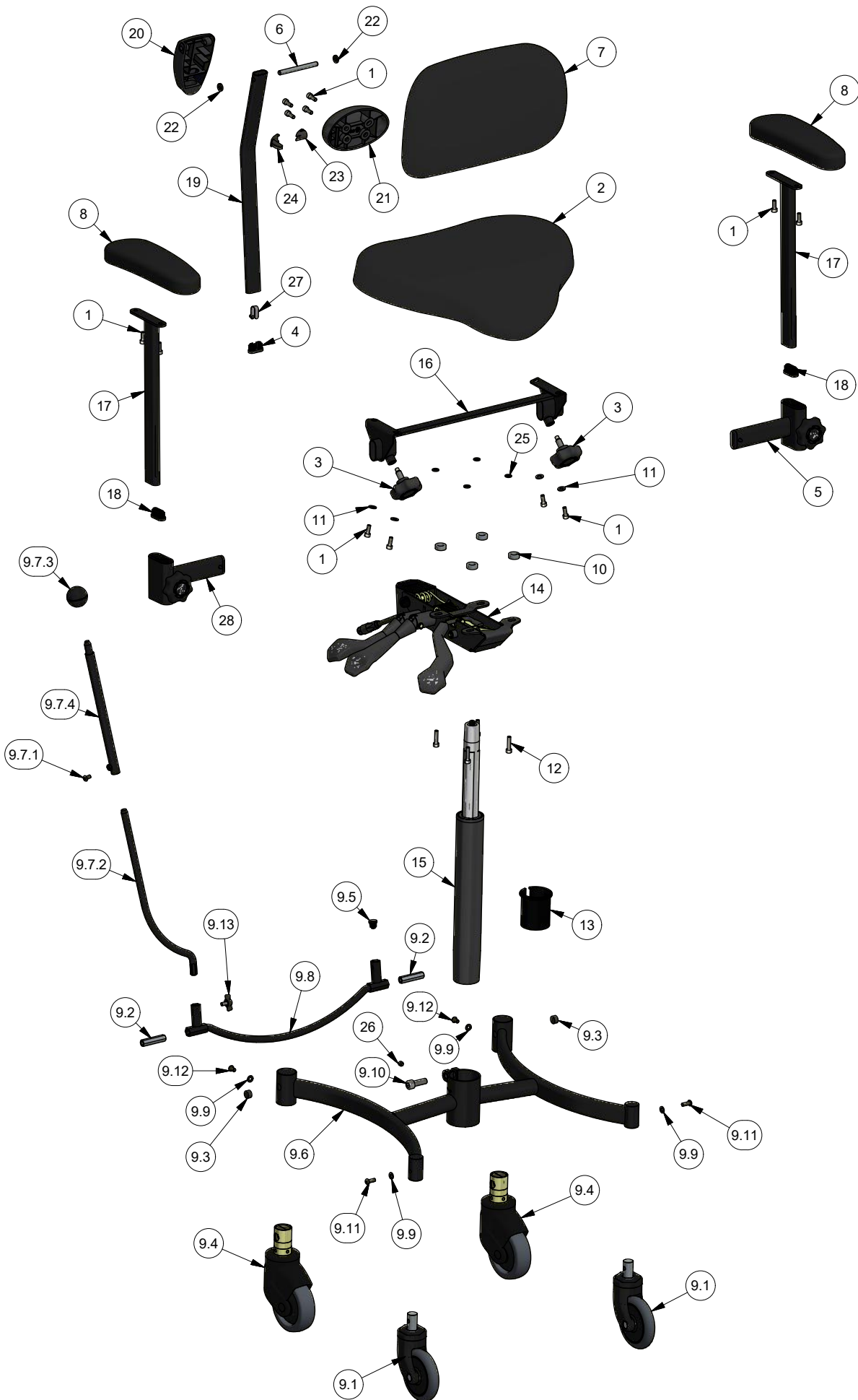

Pos	Pcs	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Item no.
1	12	Skrue m/indv. 6-kt CH	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben m/Innensechskant	8001206016
2	1	Sæde Delta 46x35 cm Bore 4.2(midi)	Seat Delta 46x35 cm Bore 4 (midi)	Sitz Delta 46x35 cm Bore 4 (midi)	06180712671
3	2	Håndskrue VELA 60 M10x25	Hand screw VELA 60 M10 x 25	Handschraube VELA 60 M10 x 25	900408
4	1	Rørben 15x30 mm flad-oval m/hak	Plug 15x30 mm	Stöpsel 15x30 mm	925890
5	1	Sidestykke Ergon armlæn Vs kpl	Sidepart for Ergon armrest Ls cpl	Seitenstück für Ergon armlehne kpl	927961
6	1	Aksel for ryghængsel	Shaft for backrest bracket	Oberteil für Rückenlehne Halterung	923284
7	1	Ergo ryg 38x22 cm, Bore R2	Ergo back rest 38x22 cm, Bore R2	Rücken Ergo 38x22 cm, Bore R2	08015111671
8	2	Armlæns pude symetrisk 8x26 samlet	Arm rest pad, Symetrical	Armauflage, Symmetrisch	15531003
9.1	2	Hjul sporkugleleje 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014915
9.2	2	Sekskant tap for bremsestang	Hexagon tap brake stick	6-kant Zapfen für Bremsstangen	923451
9.3	2	Rubber plug Ø14x7,5 mm	Rubber plug Ø14x7,5 mm	Gummistopfen Ø14x7,5 mm	923366
9.4	2	Bremsehjul Soft Lock 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014015
9.5	1	Rørben Ø15	Plug Ø15 mm	Abdeckstopfen Ø15 mm	921694
9.6	1	Fod H3 sort metallic	Frame H3 black metallic	Untergestell H3 Schwarz metallic	035379946
9.7.1	1	Skrue m/indv. 6-kt RH M6x10	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806010
9.7.2	1	Bremsestang buet m/6-kt sort metallic	Brake lever curved for Flex	Bremsstange gebogen für Flex	925726
9.7.3	1	Håndkugle for bremsestang sort	Ball for Brake Stick, Black	Kugle für Bremsstange, Schwarz	923449
9.7.4	1	Forlænger f/bremsestang sort metallic	Extension bar F/ brake stick black metallic	Verl.stange f/Bremsstange schwarz	926137
9.8	1	Bremseaksel Flex m/6-kt black metallic	Brake Shaft Uni Flex black metallic	Bremswelle Uni Flex black metallic	925727
9.9	4	Skive	Washer	Scheibe	8802806
9.10	1	Skrue m/indv. 6-kt cylindrisk hoved	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	8001210030
9.11	2	Skrue m/indv. 6-kt RH M6x16	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806016
9.12	2	Skrue m/indv. 6-kt RH M6x10	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806010
9.13	1	Vingemøtrik M6 x 11	Wing nut M6 x 11	Flügelmutter M6 x 11	927924
10	4	Afstandskive Ø20x8	Distance disc Ø20x8	Distanzscheibe Ø20x8	924886
11	4	Skive	Washer	Scheibe	8802207
12	4	Skrue m/indv. 6-kt CH M6x25	Cylinder Head Cap Screw M6x25	Zylinderschrauben m/Innen 6-kt M6x25	8001206025
13	1	Foring for Ø50 konus/yderrør koksgrå	Conical Busching Ø50 grey	Buchse konisch Ø50 Grau	924928
14	1	Bæreprade 42.2 mont. m/ betj.greb	Seat support 42.2 mounted w/handles	Sitztrageplatte 42.2 montiert m/Griffe	18422155995555
15	1	KGS gasfjeder 200 mm 300 N	KGS Column 200 mm 300 N	Gasfeder 200 mm 300 N	093030210
16	1	Armlænsbund 21	Base for Armrest 21	Armlehnehalterung 21	928301
17	2	Armlænsstang 315 sort metallic	Arm Rest Bar 315 black metallic	Armlehnesstange 315 schwarz metallic	16043
18	2	Rørben 15x35 mm flad-oval	Plug 15x35 mm flat-oval	Stöpsel 15x35 mm flach-oval	922129
19	1	Rygbøjle 21 420 mm sort metallic	Backrest arm 21 420 mm black metallic	Rückenbügel Arm 21 420 mm schwarz	07337
20	1	Ryghængsel sort	Backrest hinge black	Rückenscharnier Schwarz	925138
21	1	Underlag ryghængsel u/stop	Plate part for Hinge without stop	Aufnahme f/ Scharniere ohne Stopf	926636
22	2	Gummiskive underlag ryghængsel	Rubber disc for backrest hinge	Gummischeibe für Rückenscharnier	926585
23	1	Lås for ryghængsel	Lock for backrest hinge	Schliess für Rückenscharnier	926638
24	1	Låsetap for ryghængsel	Locking tap for backrest hinge	Schliesstap für Rückenscharnier	926637
25	4	Skive	Washer	Scheibe	8802806
26	1	Stopskrue med indv. 6-kt m/krater	Hexagon Socket Set Screw	Gewindestift	8004108008
27	1	Knopfeder for 10 mm rør	Pop-out pin for 10 mm tube	Druck-stifte Ø10 mm Rohr	923362
28	1	Sidestykke Ergon armlæn Hs kpl	Sidepart for Ergon armrest Rs cpl	Seitenstück für Ergon armlehne Rs kpl	927960