




VELA Salsa 120

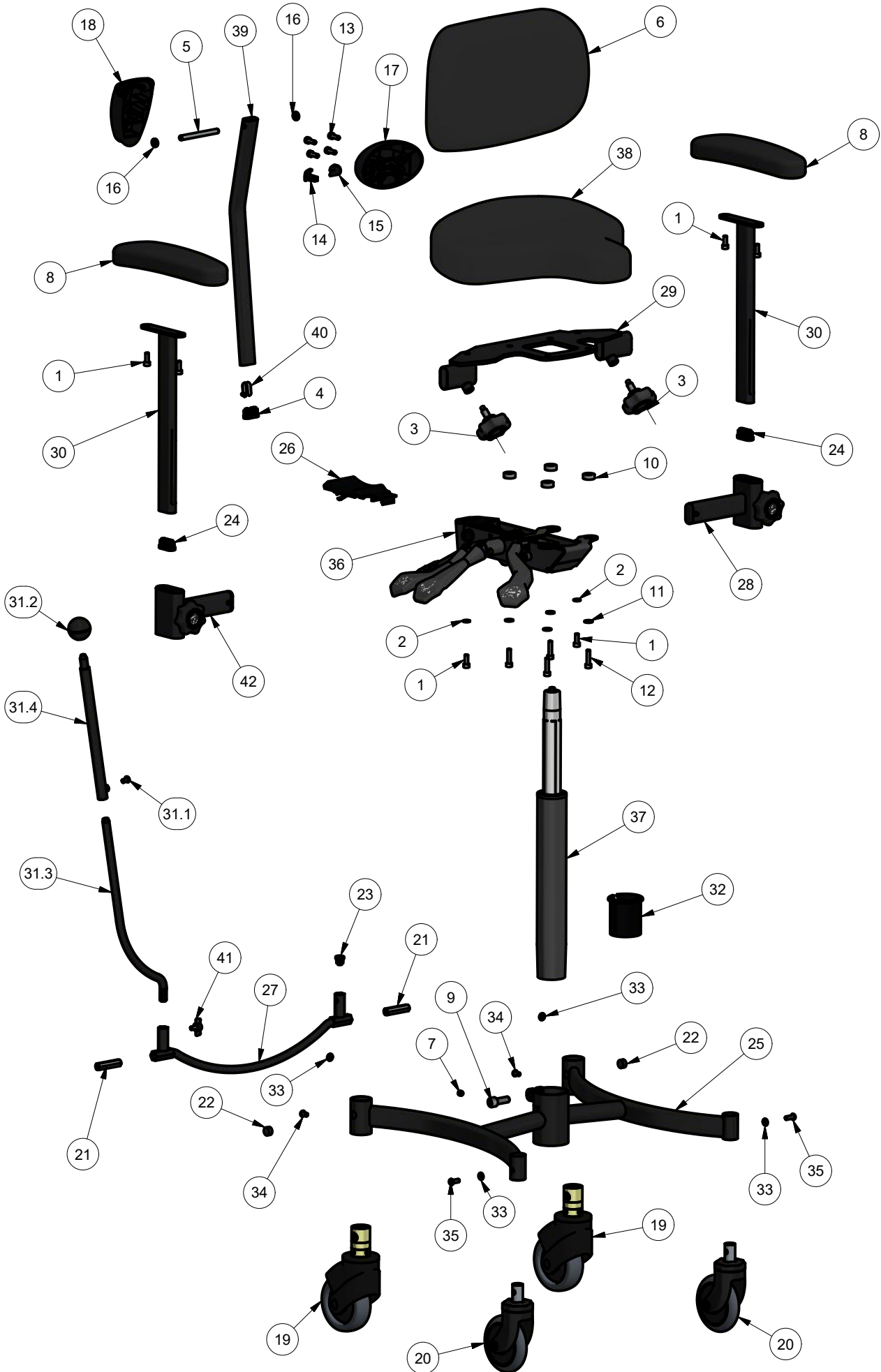

Pos	Pcs	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Stock no
1	6	Skrue m/indv. 6-kt CH	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben m/Innensechskant	8001206016
2	2	Skive	Washer	Scheibe	8802206
3	2	Håndskrue VELA 60 M10x25	Hand screw VELA 60 M10 x 25	Handschraube VELA 60 M10 x 25	900408
4	1	Rørben 15x30 mm flad-oval m/hak	Plug 15x30 mm	Stöpsel 15x30 mm	925890
5	1	Aksel for ryghængsel	Shaft for backrest bracket	Oberteil für Rückenlehne Halterung	923284
6	1	Ergo ryg 38x22 cm, Bore R2	Ergo back rest 38x22 cm, Bore R2	Rücken Ergo 38x22 cm, Bore R2	08015111671
7	1	Stopskrue med invendig sekskant med krater	Hexagon Socket Set Screw	Gewindestift	8004108008
8	2	Armlænspude symetrisk 8x26 samlet	Arm rest pad, Symmetrical	Armauflage, Symmetrisch	15531003
9	1	Skrue med invendig sekskant cylindrisk hoved	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	8001210030
10	4	Afstandskive Ø20x8	Distance disc Ø20x8	Distanzscheibe Ø20x8	924886
11	4	Skive	Washer	Scheibe	8802207
12	4	Skrue m/indv. 6-kt CH M6x25	Cylinder Head Cap Screw M6x25	Zylinderschrauben m/Innen 6-kt M6x25	8001206025
13	4	Skrue med inv. sekskant CH	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	8001206016
14	1	Låsetap for ryghængsel	Locking tap for backrest hinge	Schliesstap für Rückenscharnier	926637
15	1	Lås for ryghængsel	Lock for backrest hinge	Schliess für Rückenscharnier	926638
16	2	Gummiskive underlag ryghængsel	Rubber disc for backrest hinge	Gummischeibe für Rückenscharnier	926585
17	1	Underlag ryghængsel u/stop	Plate part for Hinge without stop	Aufnahme f/ Scharniere ohne Stopf	926636
18	1	Ryghængsel sort	Backrest hinge black	Rückenscharnier Schwarz	925138
19	2	Bremsehjul Soft Lock 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014015
20	2	Hjul sporkugleleje 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014915
21	2	Sekskant tap for bremsestang	Hexagon tap brake stick	6-kant Zapfen für Bremsestangen	923451
22	2	Rubber plug Ø14x7,5 mm	Rubber plug Ø14x7,5 mm	Gummistopfen Ø14x7,5 mm	923366
23	1	Rørben Ø15	Plug Ø15 mm	Abdeckstopfen Ø15 mm	921694
24	2	Rørben 15x35 mm flad-oval	Plug 15x35 mm flat-oval	Stöpsel 15x35 mm flach-oval	922129
25	1	Fod H3 sort metallic	Frame H3 black metallic	Untergestell H3 Schwarz metallic	035379946
26	1	Afdækning f/lameller sort	Cover f/seat support black	Abdeckung f/Sitzstütze schwarz	927364
27	1	Bremseaksel Flex m/6-kt black metallic	Brake Shaft Uni Flex black metallic	Bremswelle Uni Flex black metallic	925727
28	1	Sidestykke Ergon armlæn Vs kpl	Sidepart for Ergon armrest Ls cpl	Seitenstück für Ergon armlehne kpl	927961
29	1	Armlænsbund midi for Ergon armlæn	Armrest fixture midi for Ergon armrest	Armlehenehalter für midi armlehne	927018
30	2	Armlænsstang 315	Arm Rest Bar 315	Armlehneslange 315	16043
31.1	1	Skrue med invendig sekskant halvrundt hoved	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806010
31.2	1	Håndkugle for bremsestang sort	Ball for Brake Stick, Black	Kugel für Bremsestange, Schwarz	923449
31.3	1	Bremsestang buet med sekskant sort metallic	Brake lever curved for Flex	Bremsstange gebogen für Flex	925726
31.4	1	Forlængerstykke f/bremsestang sort metallic	Extension bar F/ brake stick black metallic	Verl.stange F/ Bremsstange schwarz metallic	926137
32	1	Foring for Ø50 konus/yderrør koksgrå	Conical Bushing Ø50 grey	Buchse konisch Ø50 Grau	924928
33	4	Skive	Washer	Scheibe	8802806
34	2	Skrue med invendig sekskant halvrundt hoved	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806010
35	2	Skrue med invendig sekskant halvrundt hoved	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	8003806016
36	1	Bæreplade mont. m/ betj.greb 42.2 bæreplade	Seat support ass. w/leaver 422 seat support	Sitztrageplatte mont. m/steuerung 422 sitztrageplatte	18422155995555
37	1	KGS gasfjeder 200 mm 300 N	KGS Column 200 mm 300 N	Gasfeder 200 mm 300 N	093030210
38	1	Sæde Midi 40x35 cm, Bore 4.2	Seat Midi 40x35 cm, Bore 4.2	Sitz Midi 40x35 cm, Bore 4.2	06190720671
39	1	Rygbøjle 21 v.54 420 mm sort metallic	Backrest arm 21 v.54 420 mm black	Rückenbügel 21 v.420 mm schwarz	07337
40	1	Knopfjeder for 10 mm rør	Pop-out pin for 10 mm tube	Druck-stifte Ø10 mm Rohr	923362
41	1	Vingemøtrik M6 x 11	Wing nut M6 x 11	Flügelmutter M6 x 11	927924
42	1	Sidestykke Ergon armlæn Hs kpl	Sidepart for Ergon armrest Rs cpl	Seitenstück für Ergon armlehne Rs kpl	927960