




VELA Tango 300

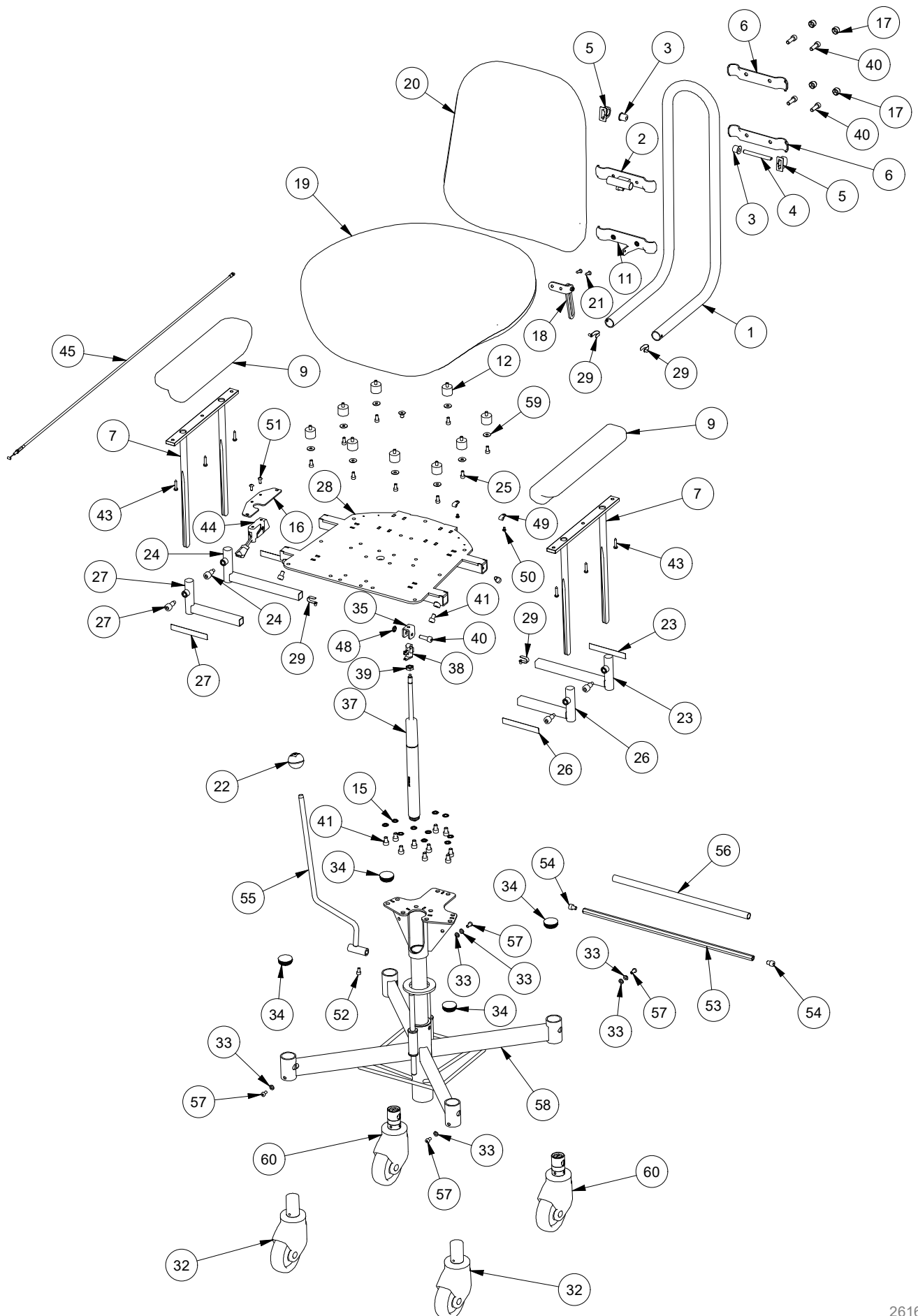

Pos	Pcs	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Stock no
1	1	Rygbøjle 565 TG 300	Back Rest Arm	Rückenbügel	07223
2	1	Beslag med hængsel for TG 300	Hinge Part for Hd-200	Schaniere Teil für Hd-200	922219
3	2	Plastbøsning for rygbøjle 19 mm	Plastic Bushing 19 mm	Plastikbuchse 19 mm	900624
4	1	Aksel Ø8 x 80	Axle 8 mm	Achse 8 mm	900303
5	2	Knaphul for rygbøjle	Buttonhole	Knopfloch	900315
6	2	Beslag for rygbøjle TG 300, Ø8 huller	Hinge Part w/Sliding Part	Schaniere Teil m/Verstellungs	922220
7	2	Armlænsstang Symetrisk, Dobb Rehab 320	Arm Rest Bar	Armléhnsstange	16017
9	2	Armlænspudder 75 x 350 sym.	Armrest Pad 75 x 350	Armléhnkissen	15502003
11	1	Beslag med vinkel, TG 300	Clamping Plate w/Fixture	Spannplatte m/Befestigung	922221
12	9	Gummipuffer Ø25-20 M6x10 M6 VELA	Rubber Socket for VELA K Seat	Gummimuffe für VELA K Sitz	900621
15	10	Tandskive M8	Serrated Lock Washer M8	Verzahnt Federring M8	8804208
16	1	Beslag for udløser greb	Bracket for Trigger unit	Beschläge für Auslöseeinheit	929143
17	4	Møtrikbeskytter M8	Cover for Nut M8, Black	Schütze für Mutter M8 Schwarz	921826
18	1	Vinkelrigle 18 komplet	Slide fixture 18 Complete	Winkelriegel 18 komplett	901413
19	1	Sæde 58 x 48 cm 671 Phoenix sort	Seat 58 x 48 cm 671 Phoenix black	Sitz 58 x 48 cm 671 Phoenix Schwarz	06062012671
20	1	Ryg 38 x 43 cm 671 Phoenix sort	Backrest 38 x 43 cm 671 Phoenix black	Rücken 38 x 43 cm 671 Phoenix Schwarz	08035411671
21	2	Træskruer 4,8 x 19 mm	Wooden screw 4,8 x 19 mm	Holzschrauben 4,8 x 19 mm	8008205020
22	1	Håndkugle for bremsestang sort	Ball for Brake Stick, Black	Kugel für Bremsestange, Schwarz	923449
23	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Vs	Sidepart for Armrestbar LH	Seitenstück für Armlehne L	900448
24	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Hs	Sidepart for Armrestbar RH	Seitenstück für Armlehne R	900447
25	10	Skrue M6 x 12 mm	Screw M6 x 12 mm	Schraube M6 x 12 mm	8001206012
26	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Vs	Sidepart for Armrestbar LH	Seitenstück für Armlehne L	900446
27	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Hs	Sidepart for Armrestbar RH	Seitenstück für Armlehne R	900407
28	1	Bærepræde Tango 300-300E komplet	Seat support Tango 300-300E complete	Sitztrageplatte Tango 300-300E komplette	05145
29	4	Knopfeder f/ 10 mm rør. 6 mm stift	Pop-out spring f/10 mm tube, 6 mm pin	Druckfeder f/10 mm Rohr, 6 mm Stift	923362
32	2	Hjul 100mm kugleleje u/bremse, bane 30mm	Castor, Bearing, witho. brake, wide 30 mm	Rolle, ohne Bremse, breite 30 mm Schwarz	014811
33	7	Skive, M6 Sort	Washer, M6 Black	Scheibe, M6 Schwarz	8802806
34	4	Rørben Ø35	Pipe insert Ø35	Rohrbeine Ø35	927016
35	1	U-beslag for gasfeder	U-bracket for gas spring	U-Bügel für Gasfeder	929144
36	1	Skrue M8 x 12 mm	Screw countersunk head M8 x 12 mm	Schraube Senkkopf M8 x 12 mm	8002208012
37	1	Gas Spring T300	Gas Spring T300	Gas Spring T300	090050152
38	1	Udløserhoved og løftestang for gas	Release head and lever for gas	Auslösekopf und -hebel für Gas	940023
39	1	Møtrik M10 til udløserhoved	Nut M10 for trigger head	Mutter M10 für Abzugskopf	940024
40	5	Skrue M8x25	Screw M8x25	Schraube M8x25	8001208025
41	14	Skrue M8x12	Screw M8x12	Schrauben M8x12	8001208012
42	2	Bolt M8x16	Screw M8x16	Schraube M8x16	8001208016
43	6	Træskruer 4,8 x 25 mm	Wooden screw 4,8 x 25 mm	Holzschrauben 4,8 x 25 mm	8011205025
44	1	Udløserenhed	Trigger unit	Auslöseeinheit	940025
45	1	Kabel f. armlæn, 1 meter	Cable f / armrest, 1 meter	Kabel f / Armlehne, 1 meter	940077
46	1	Pladeskrue 2,2x9,5	Pan head screw 2,2x9,5	Flachkopfschraube 2,2x9,5	8023202010
47	2	Stor skive M8	Washer M8	Scheibe M8	8806208
48	2	Kontramøtrik M8	Hex Nut M8	Sechskantmutter M8	8907208
49	2	Kabel clips	Cable clips	Kabelklemmen	924665
50	2	Skrue M4x6	Screw M4x6	Schraube M4x6	8017204006
51	2	Skrue M5x12	Screw M5x12	Schraube M5x12	8003805012
52	1	Skrue M6x10	Screw M6x10	Schrauben M6x10	8001206010
53	1	Bremseaksler 6-kt 11x490 mm	Hexagonal Brake Stick 490 mm	Sechskantige Bremsstange 490 mm	900132
54	2	Skrue M8 x 10	Screw M8 x 10	Schraube - M8 x 10	8001208010
55	1	Bremsestang TG300 sym. u/kugle sort	Breake-stick for Tango 300 sym. black	Bremsestange für Tango 300 sym.Schwarz	929142
56	1	Dækrør til bremseaksler	Protecting tube f/brake axis	Schutzrohr für die Bremsachse	921727
57	4	Skrue m/indv 6kt CH lav, Galv sort,M6x12, Lim	Screw M6x12 mm, black, glue	Schraube M6x12 mm, Schwarz, Kleber	8013906012
58	1	Formontage TG300 fod m/150mm inderør	Pre-assembly TG300 foot w/150mm inner tube	Vormontierter TG300-Fuß m/150mm Innenrohr	929283
59	9	Stor skive DIN 9021, 6 mm Galvaniseret	Washer, Ø6 mm, DIN 9021-6	Scheibe 6 mm DIN9021-6	8806206
60	2	Bremsehjul Soft Lock 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014015