





VELA Tango 300E

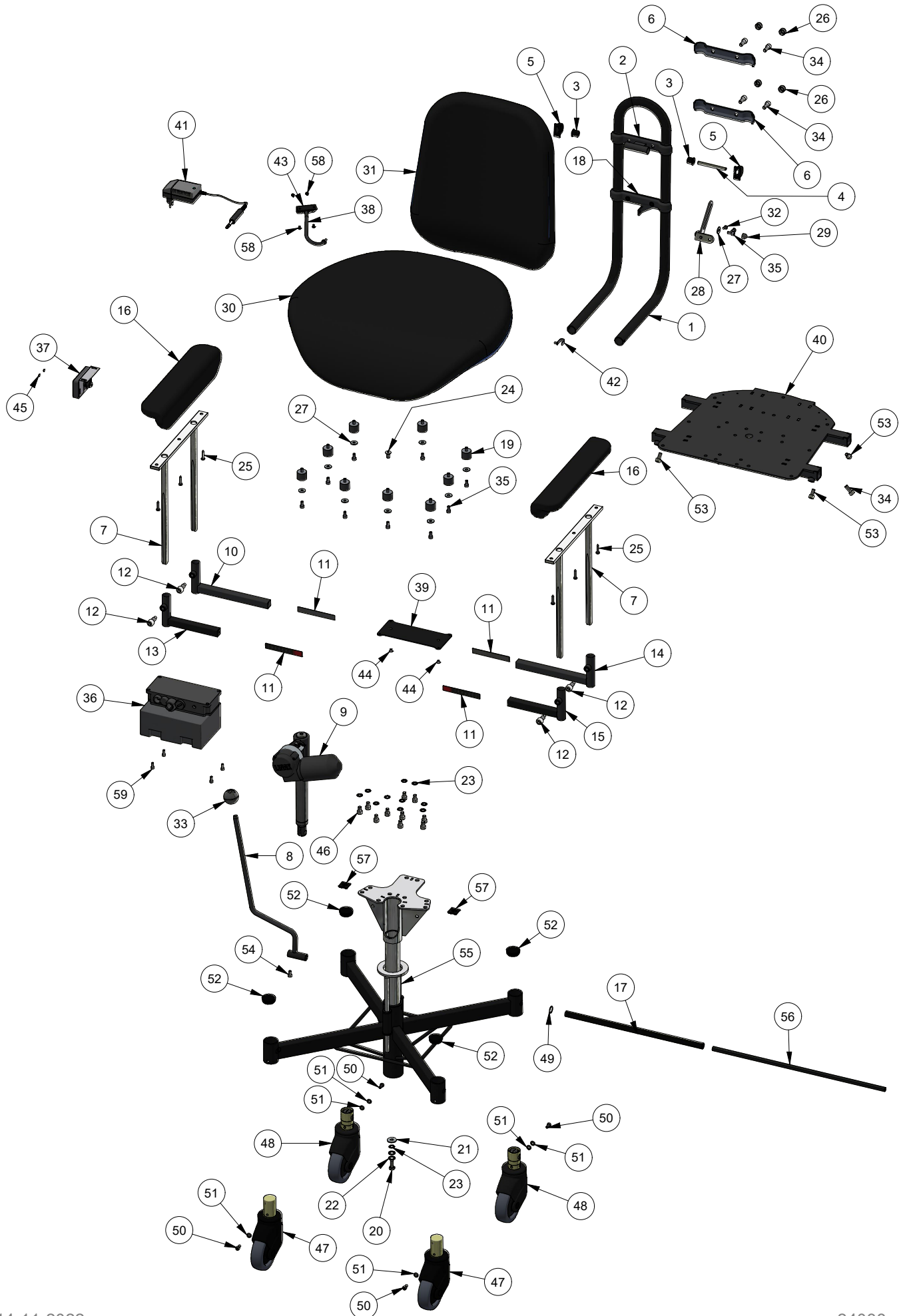

Pos	Pcs	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Item no.
1	1	Rygbøjle 565 TG 300	Back Rest Arm	Rückenbügel	07223
2	1	Beslag med hængsel for TG 300	Hinge Part for Hd-200	Schaniere Teil für Hd-200	922219
3	2	Plastbøsning for rygbøjle 19 mm	Plastic Bushing 19 mm	Plastikbuchse 19 mm	900624
4	1	Aksel Ø8 x 80	Axle 8 mm	Achse 8 mm	900303
5	2	Knaphul for rygbøjle	Buttonhole	Knopfloch	900315
6	2	Beslag for rygbøjle TG 300, Ø8 huller	Hinge Part w/Sliding Part	Schaniere Teil m/Verstellungs	922220
7	2	Armlænsstang Symetrisk, Dobb Rehab 320	Arm Rest Bar	Armlehnsstange	16017
8	1	Bremsestang TG300 sym. u/kugle sort	Breake-stick for Tango 300 sym. black	Bremsestange für Tango 300 sym.Schwarz	929142
9	1	Linak aktuator LA 30-1 150 mm	Linak actuator LA 30-1 150 mm	Linak actuator LA 30-1 150 mm	901024
10	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Hs	Sidepart for Armrestbar RH	Seitenstück für Armlehne R	900447
11	4	Mærkat "STOP"	Label "STOP"	Aufkleber "STOP"	104006
12	4	Bolt M10 x 25 neddrejet	Screw w/hexagon socket M10 x 25	Schraube m/innensechskant M10 x 25	8032210025
13	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Hs	Sidepart for Armrestbar RH	Seitenstück für Armlehne R	900407
14	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Vs	Sidepart for Armrestbar LH	Seitenstück für Armlehne L	900448
15	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Vs	Sidepart for Armrestbar LH	Seitenstück für Armlehne L	900446
16	2	Armlænspudder 75 x 350 sym.	Armrest Pad 75 x 350	Armlehnkissen	15502003
17	1	Dækrør til bremseaksel	Protecting tube f/brake axis	Schutzrohr für die Bremsachse	921727
18	1	Beslag med vinkel, TG 300	Clamping Plate w/Fixture	Spannplatte m/Befestigung	922221
19	9	Gummipuffer Ø25-20 M6x10 M6 VELA	Rubber Socket for VELA K Seat	Gummimuffe für VELA K Sitz	900621
20	1	Stål sætskrue	Hexagon head screws	Sechskantschrauben	8005208020
21	1	Stor skive M8	Washer M8	Scheibe M8	8806208
22	4	Sikringskive udvendig M10	Serrated Lock Washer M10	Fächerscheibe M10	8805210
23	13	Tandskive M8	Serrated Lock Washer M8	Verzahnt Federring M8	8804208
24	1	Skrue M8x16	Screw M8x16	Schraube M8x16	8002208016
25	6	Træskruer 4,8 x 25 mm	Wooden screw 4,8 x 25 mm	Holzschrauben 4,8 x 25 mm	8011205025
26	4	Møtrikbeskytter M8	Cover for Nut M8, Black	Schütze für Mutter M8 Schwarz	921826
27	9	Stor skive DIN 9021, 6 mm Galvaniseret	Washer, Ø6 mm, DIN 9021-6	Scheibe 6 mm DIN9021-6	8806206
28	1	Vinkelrigle 18 komplet	Slide fixture 18 Complete	Winkelriegel 18 komplett	901413
29	1	Møtrikbeskytter M6	Nut Protection M6	Mutter Schutz M6	921984
30	1	Sæde 58 x 48 cm TG 300/300E	Seat 58x48 cm TG 300/300E	Sitz 58x48 cm TG 300/300E	06062012671
31	1	Ryg 38 x 43 cm TG 300/300E	Backrest 38x43 cm TG 300/300E	Rücken 38x43 cm TG 300/300E	08035411671
32	2	Træskruer 4,8 x 19 mm	Wooden screw 4,8 x 19 mm	Holzschrauben 4,8 x 19 mm	8008205020
33	1	Håndkugle for bremsestang sort	Ball for Brake Stick, Black	Kugel für Bremsestange, Schwarz	923449
34	6	Skrue M8x20	Screw M8 x 20	Schrauben M8 x 20	8001208020
35	10	Skrue M6 x 12 mm	Screw M6 x 12 mm	Schraube M6 x 12 mm	8001206012
36	1	Kontrolboks CB	Control box CB	Kontrol CB	928799
37	1	TP1 kontakt	TP1 switch	TP1	928801
38	1	Udlagt ladestik	Charging cable	Ladekabel	928818
39	1	Beslag for motorstyring	Bracket for control box	Beschlag für Steuerung	928800
40	1	Bærepude Tango 300-300E komplet	Seat support Tango 300-300E complete	Sitztrageplatte Tango 300-300E komplette	05145
41	1	Lader 24V 0,5A han	Charger 24V 0,5A with male part	Ladegerät 24V 0,5A	928802
42	1	Knopfeder f/ 10 mm rør. 6 mm stift	Pop-out spring f/10 mm tube, 6 mm pin	Druckfeder f/10 mm Rohr, 6 mm Stift	923362
43	1	Beslag f/ ladestik	Charger bracket	Ladegerät Halterung	928900
44	2	Skrue UH M5x6 mm	Screw Countersunk head M5x6 mm	Schraube Senkkopf M5x6 mm	8002205006
45	2	Tastelinse Ø7 x 1,5 mm	Rubber bump Ø7 x 1,5 mm	Gumminoppe Ø7 x 1,5 mm	924750
46	10	Skrue M8x12	Screw M8x12	Schrauben M8x12	8001208012
47	2	Hjul 100mm kugleleje u/bremse, bane 30mm	Castor, Bearing, witho. brake, wide 30 mm	Rolle, ohne Bremse, breite 30 mm Schwarz	014811
48	2	Bremsehjul Soft Lock 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014015
49	1	O-ring Ø9,25 x 1,78 mm	O-ring Ø9,25 x 1,78 mm	O-Ring Ø9,25 x 1,78 mm	922996
50	4	Skrue m/indv 6kt CH lav, Galv sort,M6x12, Lim	Screw M6x12 mm, black, glue	Schraube M6x12 mm, Schwarz, Kleber	8013906012
51	6	Skive, M6 Sort	Washer, M6 Black	Scheibe, M6 Schwarz	8802806
52	4	Rørben Ø35	Pipe insert Ø35	Rohrbeine Ø35	927016
53	4	Bolt M8x16	Screw M8x16	Schraube M8x16	8001208016
54	1	Skrue M6x10	Screw M6x10	Schrauben M6x10	8001206010
55	1	Formontage TG300 fod m/150mm inderrør	Pre-assembly TG300 foot w/150mm inner tube	Vormontierter TG300-Fuß m/150mm Innenrohr	929283
-	1	Formontage TG300 fod m/200mm inderrør	Pre-assembly TG300 foot w/200mm inner tube	Vormontierter TG300-Fuß m/200mm Innenrohr	929284
56	1	Bremseaksel 6-kt 11x490 mm	Hexagonal Brake Stick 490 mm	Sechskantige Bremsstange 490 mm	900132
57	2	Ledningsholder 25 x 25 mm sort	Holder for wire	Halterung für die Draht	996032
58	4	Skrue M4x6	Screw M4x6	Schraube M4x6	8003104006
59	4	Skrue med indiv. 6kt. cylindrisk hoved	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	8001205012

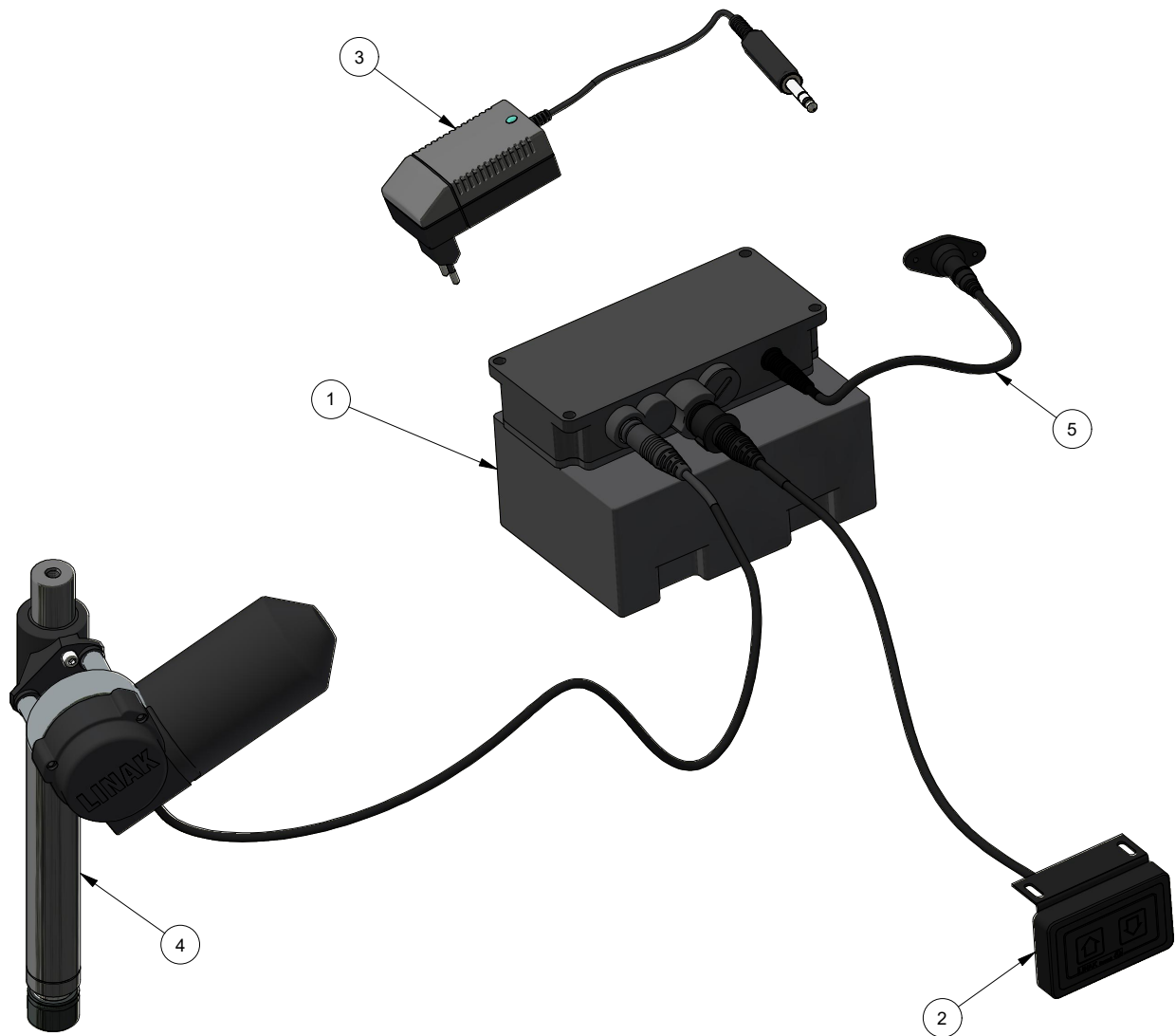

Mark.	Stk.	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Vare nr.
1	1	Kontrolboks CB	Control box CB	Kontrol CB	928799
2	1	TP1 kontakt	TP1 switch	TP1	928801
3	1	Lader 24V 0,5A han	Charger 24V 0,5A with male part	Ladegerät 24V 0,5A	928802
4	1	Aktuator LA30 150 mm	Actuator LA30 150 mm	Actuator LA30 150 mm	928797
	-	Aktuator LA30 200 mm	Actuator LA30 200 mm	Actuator LA30 200 mm	928798
5	1	Forlænger til lader TG310E	Extender for charger TG310E	Extender für Ladegerät TG310E	928818
-	2	Batteri ROCKET 12V 2,9Ah	Battery ROCKET 12V 2.9Ah	Batterie ROCKET 12V 2.9Ah	901404